



Diana Baronin von Schaezler GmbH
Ihr Hygienespezialist

Schaezler Careful Hygienetücher protect

Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion (begrenzt viruzid PLUS)

- Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung
- Umfassende, schnelle Wirksamkeit
- Besonders geeignet zur Desinfektion von mittelgroßen Flächen in patientennahem Bereich

Produktinformation:

Schaezler Careful Hygienetücher protect sind alkoholische, gebrauchsfertige Tücher zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art in patientennahen Bereichen.

Schaezler Careful Hygienetücher protect bietet bei der Desinfektion und Reinigung von mittelgroßen Flächen eine universelle und zeitsparende Anwendung. Die Tücher lassen sich einzeln aus der praktischen Packung mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen.

Schaezler Careful Hygienetücher protect basieren auf einer optimal aufeinander abgestimmten Kombination von Tuchmaterial und Tränkflüssigkeit. Dadurch ist eine wirksame Desinfektion innerhalb kürzester Zeit möglich, wobei auch empfindliche Flächen und Materialien schonend behandelt werden und keine Streifen und sichtbare Rückstände verbleiben.

Anwendung:

Flächen mit Schaezler Careful Hygienetücher protect bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Anwendungsgebiete:

Schnelldesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.

Anwendungshinweise:

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 3 Monate

Zusammensetzung: 100 g enthalten: 45 g Ethanol

Wirkungsspektrum und Einwirkzeit:

			30s	1 min	2min	3 min
Bakterien und Hefen						
Bakterizid, levurozid	VAH/EN16615	mit Mechanik, hohe Belastung			X	
Bakterizid, levurozid	EN13697	ohne Mechanik, niedrige Belastung		X		
tuberkulozid (M.terrae)	EN 14348	niedrige Belastung	X			
mykobakterizid (M.avium)	EN 14348	niedrige Belastung		X		
Viren						
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	niedrige Belastung				X
begrenzt viruzid	EN 14476	hohe und niedrige Belastung	X			
(u.a. Coronaviren)	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	X			
Rotaviren	EN 14476	niedrige Belastung	X			
Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung				X
	prEN 16777	niedrige Belastung				X
Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung		X		
		hohe Belastung	X			
	prEN 16777	niedrige Belastung				X
Ergänzende Prüfergebnisse						
Bakterizid	EN 13727	hohe und niedrige Belastung		X		
Levurozid (C.albicans)	EN 13624	hohe und niedrige Belastung		X		

Gebinde: Beutel mit 90 Tücher / 140 * 200 mm **Art-Nr.:** CSHYG08 neutral

Anmerkungen: Gutachten:

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flamen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen! Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung

VAH/DGHM gelistet.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen

Stand: 03.2021