



Diana Baronin von Schaezler GmbH
Ihr Hygienespezialist

Safeline Prent Des, Abformdesinfektion

Lösung zur Desinfektion und Reinigung von Abformungen und
zahntechnischen Werkstücken

- gebrauchsfertig
- garantierte Dimensionsgenauigkeit
- greift die Oberflächen nicht an

Präparatetyp: Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion und Reinigung von Abformungen aus Polyether, Silikonen, Alginaten und Hydrokolloiden sowie allen anderen zahntechnischen Werkstücken.

Zusammensetzung: Wirksamer Bestandteil in 100 g Lösung: Benzalkoniumchlorid 0,48g, Glyoxal 0,20g, Glutaraldehyd 0,01g

Chemische-physikalische Eigenschaften:

Aussehen: hellblaue, klare Lösung
ph-Wert: 5,5 +/- 1,0
Dichte (20°C): 1,000 +/- 0,003

Anwendungsgebiete: Gebrauchsfertige Lösung zur schnellen Desinfektion und gründlichen Reinigung von zahntechnischen Werkstücken und Prothetikmaterial wie Abformungen aus Polyether, A/C Silikonen, Alginate und Hydrokolloiden.

Anwendung: Werkstücke aus Alginaten und Hydrokolloiden kurz eintauchen und anschließend 5 Minuten abtrocknen lassen.

Andere Materialien 5 Minuten in die Lösung einlegen, anschließend mit Wasser abspülen.

Konzentration und Einwirkzeit:

bakterizid inkl. MRSA, levurozid
gem. VAH-Richtlinien
geprüft bei hoher Belastung: 5 Minuten
HBV/HIV/HCV, BVDV, Vakzinia-Viren
(begrenzt viruzid gem. RKI/DVV) 1 Minute

Verpackung:

5 Liter Kanister

Standzeit:

1 Tag

Besonderer Hinweise:

Enthält Glyoxal. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Gutachten:

Prof. Dr. Schuber, Frankfurt/Main: Gutachten zur Instrumentendesinfektion nach DGHM/VAH Richtlinien vom 02.08.2013

Dr. Suchomel, Wien: Gutachten zur Instrumentendesinfektion nach DGHM/VAH Richtlinien vom 01.08.2013

VAH/DGHM gelistet

Stand: 08.2019

Alter Postweg 101
D-86159 Augsburg

Tel. 08 21/2 57 37-0
Fax. 08 21/2 57 37-77

<http://www.schaezler.de>
e-mail:service@schaezler.de