



Diana Baronin von Schaezler GmbH
Ihr Hygienespezialist



Schaezler Careful Absauganlagendesinfektion

Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung dentaler Absauganlagen

Anwendungsgebiete: Desinfektion, Reinigung und Pflege dental Absauganlagen aller Hersteller. Schaezler Careful Absauganlagendesinfektion basiert auf einer materialschonenden quartären Ammoniumverbindung und besitzt hervorragende Reinigungseigenschaften. Schaezler Careful Absauganlagendesinfektion reinigt besonders schaumarm und ist frei von Aktivchlor. Zur Desinfektion von Mundspülbecken geeignet.

Zusammensetzung: 100 g enthalten:
6,0 g Decylisononyldimethylammoniumchlorid

**Wirkungsspektrum, Konzentration und
Einwirkzeit:**

<u>Spektrum</u>	<u>Einwirkzeit</u>
Bakterizid inkl. MRSA, levurozid (Pilze) (hohe organische Belastung)	2 % - 15 Min.
Bakterizid inkl. MRSA, levurozid (Pilze) (hohe organische Belastung)	1 % - 30 Min.
wirksam gegen alle behüllten Viren Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Influenza A, Rota, Adeno (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)	2 % - 10 Min.
wirksam gegen alle behüllten Viren Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Influenza A, Rota, Adeno (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)	1 % - 20 Min.

Anwendungsweise:

Einwirkzeit beachten. Mindestens einmal täglich anwenden. Nach Desinfektion der Absauganlage mit klarem Wasser nachspülen. Mit ca. 40 – 50 °C warmen Wasser verdünnt ansetzen und unverzüglich absaugen. Zuerst Wasser dann Konzentrat auffüllen. Nach Arbeitsende anzuwenden. Nicht über Nacht in der Anlage stehen lassen. Nicht mit anderen Präparaten mischen.

Verpackung:

10 Liter Kanister

Anmerkungen:

Reizt die Augen. Berührung mit den Augen vermeiden. Leicht entzündlich. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Gutachten:

Prof. Werner, Schwerin: DGHM-Gutachten
Prof. Schuber, Frankfurt: DGHM-Gutachten
Dr. Steinmann, Bremen: BVDV / Vakzinia Gutachten

VAH/DGHM gelistet

Alter Postweg 101
D-86159 Augsburg

Tel. 08 21/2 57 37-0
Fax. 08 21/2 57 37-77

<http://www.schaezler.de>
e-mail:service@schaezler.de