



Diana Baronin von Schaezler GmbH
Ihr Hygienespezialist



Schaezler Careful Flächendesinfektion

Konzentrat zur Flächendesinfektion und -reinigung

Anwendungsgebiete: Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen aller Art. Schaezler Careful Flächendesinfektion kann auch als alkoholfreie Schnelldesinfektion verwendet werden. Die anwenderfreundliche Wirkstoffkombination hat eine sehr hohe Reinigungskraft und ist auch für Acrylglas geeignet.

Gem. MPG: Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidrichtlinie: Zur Desinfektion und Reinigung von Flächen und medizinischem Inventar aller Art.

Zusammensetzung: 100 g enthalten:

6,66 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Bezy-l-c12-16-alkyldimethyl-, -Chloride;

3,33 g Didecyldimethylammoniumchloride

Enthält: Nichtionische Tenside > 5 %

Anwendung:

Oberfläche mit Gebrauchslösung vollständig benetzen. Einwirkzeit einhalten.

Wirkungsspektrum, Konzentration und

Einwirkzeit:

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- virusinaktivierend inkl. BVDV, Vakzinia, HBV, HIV, HCV (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)

Spektrum

Einwirkzeit

Bakterizid inkl. MRSA, levurozid
(hohe organische Belastung)

2 % - 30 Min
1 % - 60 Min.

Viren
BVDV, Vakzinia

2,5 % - 5 Min.
2,0 % - 15 Min.

HBV, HIV, HCV

2,5 % - 5 Min.
2,0 % - 15 Min.

Rota-Viren

0,5 % - 30 Sek.

Verpackung:

5 Liter Kanister

Kennzeichnung gem: EU Richtlinien:

Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid; Didecyldimethylammoniumchlorid; Alkoholethoxylat C9-C11.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen.

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/

Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI

BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit

Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

spülen. Vorhanden Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Freisetzung in die Umwelt

vermeiden. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder

kommunaler Sammelstelle zuführen.

VAH/DGHM gelistet

Alter Postweg 101
D-86159 Augsburg

Tel. 08 21/2 57 37-0
Fax. 08 21/2 57 37-77

<http://www.schaezler.de>
e-mail:service@schaezler.de