



Diana Baronin von Schaezler GmbH
Ihr Hygienespezialist



SCHAEZLER CAREFUL TRAY CLEANER

Flüssiges Konzentrat zur Reinigung von Abformlöffeln, Anmischhilfen und Dentalinstrumenten

- Kraftvolle Reinigung
- Besonders materialschonend
- Ideal zur Verwendung im Ultraschallbad

SCHAEZLER CAREFUL TRAY CLEANER ist ein flüssiges Konzentrat zur Reinigung im Rahmen der korrekten Aufbereitung von Medizinprodukten wie Abformlöffel, Anmischhilfen und Dentalinstrumenten. Die innovative Formulierung bietet aufgrund der mildalkalischen Rezeptur eine sehr gute Reinigungsleistung und ist gleichzeitig materialschonend. Schaezler Careful Tray Cleaner ist geeignet zur Reinigung aller korrosionsbeständigen Metalle sowie empfindlicher Materialien wie eloxiertem Aluminium. Für den Einsatz im Ultraschallbad ist Schaezler Careful Tray Cleaner ebenfalls ideal geeignet.

Anwendungsbereiche:

SCHAEZLER CAREFUL TRAY CLEANER ist für die selbsttätige Reinigung von Abformlöffeln, Anmischhilfen und Dentalinstrumente geeignet. Es löst selbst starke Verschmutzungen und Anhaftungen von Alginaten, Haftlacken und Zementen sowie Rückstände von Zinkoxid-Eugenol, Carboxylat- und Phosphat.

Anwendung:

Anwendung im Tauchbad:

Verschmutzte Abformlöffel und Instrumentarien grob vorreinigen und je nach Verschmutzungsgrad für einige Stunden in eine 5 – 10%-ige Anwendungslösung (50 bis 100 ml Reinigungskonzentrat auf 1 Liter Anwendungslösung) einlegen. Das Einwirken der Lösung über Nacht bietet eine einfache Handhabung und eine optimale Reinigungsleistung. Verbliebene bzw. nicht vollständig abgelöste Schmutzpartikel anschließend mit Wasser und einer geeigneten Bürste von Abformlöffeln und Instrumenten sorgfältig entfernen. Die Instrumente nach gründlichem Spülen weiter aufbereiten. Die Verwendung von warmen Wasser erhöht den Reinigungseffekt.

Anwendung im Ultraschallbad:

Verschmutzte Abformlöffel und Instrumente je nach Verschmutzungsgrad für 15 – 30 Min. in einer 10%-igen Anwendungslösung (100 ml Reinigungskonzentrat auf 1 Liter Anwendungslösung) in einem Ultraschallbad behandeln. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen den Vorgang wiederholen. Anschließend das Reinigungsgut gründlich spülen und weiter aufbereiten.

Zusammensetzung:

Anionische Tenside 5 – 15%, Korrosionsinhibitoren, Reinigungsverstärker.

Besondere Hinweise:

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Verpackung:

5 Liter Kanister

Staffelpreise auf Anfrage
2% Skonto
bei Lastschrift 3% Skonto

Alter Postweg 101
D-86159 Augsburg

Tel. 08 21/2 57 37-0
Fax. 08 21/2 57 37-77

<http://www.schaezler.de>
e-mail: service@schaezler.de