



Diana Baronin von Schaezler GmbH
Ihr Hygienespezialist

Schaezler Careful Medium Wet Wipes protect

Alkoholische Schnelldesinfektionstücher
für Flächen und Inventar im medizinischen Bereich

Produktinformation:

Zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen, Inventar und Gegenständen in Arztpraxen, Heimen und Kliniken, sowie von Hand- und Winkelstücken im Dentalbereich. Die Fläche trocknet nach kurzer Zeit schnell und rückstandsfrei ab. Einwirkzeiten beachten. Nicht anzuwenden bei alkoholempfindlichen Flächen, wie z. B. Acrylglas.

Schaezler Careful Medium Wet Wipes protect (60 Tücher) 20 x 22 cm

- Material: **hochwertiges, fusselarmes Vlies** aus 100% Kunstfaser
- Hochwertige Tuchqualität mit textilähnlichem Charakter, hohe Reißfestigkeit und gleichzeitig gute Saugfähigkeit
- Extrem nassfest und abriebfest, dennoch sehr weich. Somit schonend für die Oberflächen von Labor- und Praxisinterieur.
- Die Tücher geben die Desinfektionslösung hervorragend ab und gewährleisten eine einwandfreie Benetzung der zu desinfizierenden Fläche.
- Das Tuch ist silikonfrei, lebensmittelecht und aldehydfrei.
- Erhältlich in der Duftnote: Neutral

Anwendung:

Flächen mit Schaezler Careful Medium Wet Wipes protect bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Standzeit nach dem Öffnen: 3 Monate.

Zusammensetzung: 100 g enthalten:
45 g Ethanol

Wirkungsspektrum und Einwirkzeit:

Bakterien und Hefen

Bakterizid, levurozid	VAH/EN16615	mit Mechanik, hohe Belastung	30s	1 min	2 min	3 min
tuberkulozid (M.terrae)	EN 14348	niedrige Belastung	X			
mykobakterizid (M.avium)	EN 14348	niedrige Belastung		X		

Viren

begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	niedrige Belastung				X
begrenzt viruzid	EN 14476	hohe und niedrige Belastung	X			
(u.a. Coronaviren)	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	X			
Rotaviren	EN 14476	niedrige Belastung	X			
Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung				X
	prEN 16777	niedrige Belastung				X
Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung		X		
		hohe Belastung	X			
	prEN 16777	niedrige Belastung				X

Ergänzende Prüfergebnisse

Bakterizid	EN 13727	hohe und niedrige Belastung		X		
Levurozid (C.albicans)	EN 13624	hohe und niedrige Belastung		X		

Gebinde: Flowpack mit 60 Tücher / 20 x 22 cm Art-Nr.: CSWM neutral

Anmerkungen:

Gutachten für die Tränkelösung:

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flamen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen! Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung

VAH/DGHM gelistet.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen

Stand: 06.2021